



Blutentnahme- Set TAP[®] Micro Select

Einweg Blut-Kollektor
Testmaterial und Anleitung


Blutentnahme-Set TAP[®] Micro Select

Einweg Blut-Kollektor und Anleitung

Inhalt: 1x Anleitung, 1x steriler Einweg Blut-Kollektor, 1x BD Micro-tainer (LH), 1x Wärmekissen, 1x Alkohol-Tupfer, 1x Pflasterstreifen

Wichtige Hinweise und Vorbereitung

TAP[®] Micro Select ist ein Einweg Blut-Kollektor zur Gewinnung von kapillären Vollblutproben am Oberarm. Wählen Sie die Stelle am unverletzten **Oberarm** aus – falls vorhanden rasieren sie feine Härchen ab. Waschen Sie Ihre Hände **gründlich**. Öffnen Sie die **unversehrte** Verpackung an der losen Ecke. **Stecken** Sie das beiliegende BD Microtainer-Röhrchen auf den Blut-Kollektor-Aufsatz. Ziehen Sie den **Haftstreifenschutz** unten am Blut-Kollektor **noch nicht** ab. Der Klebstreifen muss später **einwandfrei** haften. Legen Sie den Blut-Kollektor mit dem aufgesteckten Röhrchen zur Seite.

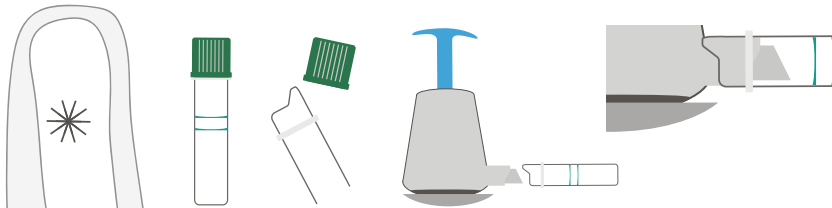





1. Aktivieren Sie das Wärmekissen, indem Sie die silberne Scheibe **zwischen Daumen und Zeigefinger** mehrmals vor- und zurückbiegen.



2. **Erwärmen** Sie die unverletzte Entnahmestelle, um die **Durchblutung** anzuregen. Halten Sie das Wärmekissen für 4 Min. auf die Stelle.

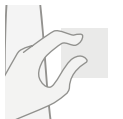


3. **Desinfizieren** Sie die Entnahmestelle. Warten Sie bis die Haut wieder getrocknet ist.

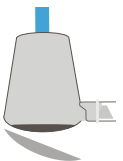


4. **Ziehen** Sie den **Haftstreifenschutz** unten am Blut-Kollektor ab. Klebeseite dabei **nicht** berühren.


5. Das **BD Microtainer-Röhrchen** muss bei Positionierung in **Richtung Boden** zeigen. Die Klebeseite darf nur **einmal** auf die Haut aufgebracht werden.

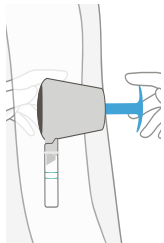


Mit einer **Hand hinter den Arm** setzen Sie den Blut-Kollektor **gerade** auf die zuvor erwärmte Stelle des Oberarms und **drücken** ihn leicht an, sodass die Klebeflächen **vollständig** auf dem Arm haften.

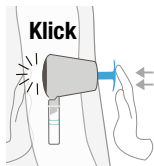

6. Bleiben Sie mit dem **Blut-Kollektor** an dieser Stelle, halten Sie mit der anderen Hand dagegen und **drücken** Sie dann fest auf den blauen Griff bis ein **Klick** hörbar ist.

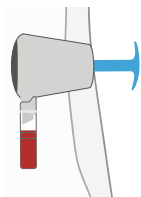


7. **Lassen** Sie den Blut-Kollektor vorsichtig **los**. Der Griff **springt** wieder zurück. Das BD Microtainer-Röhrchen füllt sich automatisch, ggf. fließt das Blut nicht sofort. **Die Entnahme sollte nach 2–3 Min. abgeschlossen sein***. Ist das Röhrchen **ausreichend** (mind. bis zur Füllstandslinie) gefüllt, kann der Blut-Kollektor abgezogen werden.

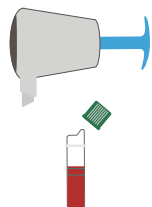


*Ist nach 2–3 Min. der Microtainer **nicht** ausreichend gefüllt, Blut-Kollektor entfernen und eine **neue** Blut-entnahme durchführen.

8. **Ziehen** Sie den Blut-Kollektor **vorsichtig** vom Arm ab und halten Sie das BD Microtainer-Röhrchen weiter nach unten. Lösen Sie das Röhrchen **sofort** ab und **verschliessen** Sie es.

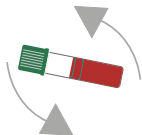

9. Das Blut jetzt unmittelbar **gründlich**, aber **schonend** durch **achtmaliges** Über-Kopf-Drehen mischen.

10. Probe mit **Auftragsetikett** (Patientenangaben) bekleben und in die Laborversandtüte legen, ggf. Auftragsformular beilegen. Proben dem Laborkurier übergeben oder per Post einsenden.

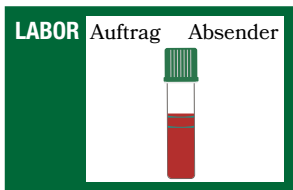

11. **Entsorgen** Sie den Blut-Kollektor in der stichfesten **Entsorgungsbox**.

Alle Angaben zu einzelnen **Analysen** und Analysen-Profilen finden Sie in unserem Analysenverzeichnis unter **labordiagnostic.ch/analysen**.

Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Blutentnahme-Set TAP® Micro Select, dann ist unser Team der Kundenberatung gern für Sie da. **labordiagnostic.ch/beraten**

Das Wärmekissen kann man (immer) wieder benutzen. Wie, das erklären wir hier:

labordiagnostic.ch/tap



Warnhinweise

Nicht verwenden, wenn die Verpackung von TAP® Micro Select beschädigt ist.

Nicht verwenden nach Ablauf des Verfallsdatums.

TAP® Micro Select nicht verschieben, nachdem es auf der Haut aufgeklebt ist.

Vorsichtsmassnahmen

TAP® Micro Select ist ein Einwegprodukt.

TAP® Micro Select an einer Stelle am Oberarm mit möglichst wenig Haarwuchs anwenden, damit es gut haftet.

Lagerung

Bei 18–28 °C lagern

Achtung

Nicht anwenden auf verletzter Haut (z. B. offene Wunde, Ausschlag)

Nicht anwenden, wenn eine Allergie gegen Edelstahl besteht.

Bei Anwendung im Gesundheitswesen: CLSI-Richtlinien oder die Richtlinien Ihrer Institution bezüglich Erwärmung vor der kapillären Blutentnahme befolgen.

Legende der Symbole des TAP® Micro Select / Packungsaufkleber



Packungsbeilage beachten



Conformité Européenne entspricht EU-Richtlinien



Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen



Medical Device / Medizinprodukt

0459

LOT-Nr / Los- bzw. Chargen-Nr. (siehe Aufkleber)



Nur einmalig verwendbar



Bereits sterilisiert mittels Strahlensterilisation



Lagertemperatur 18–28 °C



Beschädigte Produkte nicht benutzen



Zu verwenden bis (siehe Aufkleber)



Hersteller (UDI-Träger)



EU-Importeur



CH-Importeur

REF

Bestellnummer: Art. Nr.: LAB-0022



Werte für
Gesundheit
labordiagnostic.ch



Labordiagnostic
St. Gallen West AG

Medizinische Analytik
Zürcher Strasse 505
9015 St. Gallen
Schweiz

Zentrale +41 71 343 83 83
Mail info@labordiagnostic.ch
Website labordiagnostic.ch
Socialmedia @labordiagnostic

